

使用说明



Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸) 产品

- Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸)
- QC Sets and Panels — Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸)

预定用途

Helix Elite™ 分子标准 (灭活颗粒) 和 QC 套组和检测组 — Helix Elite™ 分子标准 (灭活颗粒) 旨在通过分子检测进行定性检测的外部质控品。

概要说明

分子检测可提供有关有机体存在的快速准确结果。正确解释分子测试需要用到质控品。Helix Elite™ 分子标准 (灭活颗粒) 产品是易于使用的过程质控品, 可用于监测分子检测或仪器的提取、扩增和检测情况。这些独立质控品也可用于评估实验室熟练程度和培训, 或根据各种法规要求和标准确定化验耗材的批次间一致性。

原理

Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸) 产品由经化学、放射或热处理灭活的培养有机体组成。每颗丸体采用一次性箔袋包装。有关质控品的处理, 用户应遵循试剂盒制造商或实验室规程。

成分

Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸) 产品由独立包装的的质控材料组成, 内含在专利的辅料基质中保持稳定的灭活病原体。

警告和注意事项

- 仅供体外诊断使用。
- 仅供专业使用。供接受过试剂盒使用培训的人员使用。
- 如不准备使用, 请勿打开铝箔袋。
- 本品必须作为含有活的微生物的样本处理, 并按照美国卫生与公众服务部疾病控制和预防中心 (CDC) 和国立卫生研究院 (NIH)、微生物和生物医学实验室生物安全或其他同等指南所述的生物安全 2 级实践进行处理。
- 穿戴适当的个人防护装备。
- 更多详细信息, 请参阅安全数据表 (SDS)。SDS 可在 Microbiologics 网站 (www.microbiologics.com) 上找到, 或拨打 1.320.229.7045 或美国免费电话 1.866.286.6691 向技术支持人员索取。
- 这些产品不含 67/548/EEC 或 1272/2008/EC 中所列的任何有害物质。
- 这些产品不是用天然橡胶胶乳制成。



- 客户有责任确保质控品与所用的试剂盒或方案的兼容性。

未提供的必要物品

- 核酸提取套组和试剂盒
- 检测仪器
- 根据所要进行的检测，可能还需要再水合缓冲液，例如无核酸酶水、磷酸盐缓冲盐水（phosphate buffered saline, PBS）、样品制备试剂或转运培养基
- 能够转移 0.5-1000 μ l 体积的移液器
- 无核酸酶气溶胶屏障移液器吸头
- 涡旋振荡器
- 微型离心机

使用说明

制备

1. 阅读试剂盒包装说明书、使用说明或适用的实验室规程。
2. 在切口处撕开小袋。
3. 从小袋中取出小瓶，确保丸体位于小瓶底部，然后打开。

A. Helix Elite™ Molecular Standards（灭活丸）

4. 用适当的缓冲液将冻干丸体再水合。建议最小体积为 100 μ l。
5. 将小瓶全速涡旋振荡 10 秒以混合。离心以收集试管底部再水合的灭活靶材料。
6. 取适量用于检测，并按照实验室规程或制造商的说明处理样品。

附注：每颗丸体预期用作一次性测试。可以立即进行稀释并使用。不建议储存再水合或稀释的材料以备将来使用。

B. QC Sets and Panels — Helix Elite™ Molecular Standards（灭活丸）

4. 将冻干丸体加入含有适当缓冲液、转运培养基或无核酸酶水的试管或小瓶中再水合。对于最低水合体积：
 - 请参阅分类编号的产品页面，网址：www.microbiologics.com 或参阅 *QC Sets and Panels: 最低水合体积* 文档，网址：www.microbiologics.com，或
 - 致电 1.320.229.7045，美国免费电话 1.866.286.6691，或发送电子邮件至 techsupport@microbiologics.com 联系技术支持人员。
5. 将再水合的丸体涡旋振荡 10 秒或直至丸体溶解。
6. 取适量的再水合丸体用于检测，并遵循有关样品处理的实验室规程或制造商说明书。**附注：**每颗丸体预期用作一次性测试。可以立即进行稀释并使用。不建议储存再水合或稀释的材料以备将来使用。

储藏和期限

将带原包装的 Helix Elite™ Molecular Standards（灭活丸）产品在 2°C - 25°C 下存放，直至指定的有效期*。
打开铝箔袋后立即使用丸体。

如果出现以下情况，则不得使用 Helix Elite™ Molecular Standards（灭活丸）产品：

- 储藏不当
- 有过度接触高温或水分的情况
- 已过期

*附注：分类编号 8180、8181、8184 和 8198 带原包装在 2°C - 8°C 下存放，直至指定的有效期。

局限

本品不适合用于所有套组和程序。只有与微生物提取的核酸序列混合的引物和探针才能产生阳性反应。

微生物状态

本品采用合适的灭活方法制备。虽然本品经测试无害，但仍建议采用通用的实验室预防措施，并且应将材料视为含有活的微生物的样品处理。

标志解释



产品批号（批次）



分类编号



警告，参阅随附文件



包含足够 <n> 次测试的量



体外医疗器械



欧盟授权代表



生产商



温度限制



使用期限



参阅使用说明



电话号码



CE 标志

产品质量保证

- 这些产品保证符合产品说明书、使用说明和支持文献内载列和阐释的规格与性能。
- 保证（明示或暗示）在以下情况下受到限制：
 - 实验室采用的程序违反所载列或阐释的指示和说明
 - 产品被用于产品说明书、使用说明和支持文献中列举的预定用途之外的用途

网站

如需最新技术信息和产品供应信息，请访问我们的网站 www.microbiologics.com。

鸣谢



Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
www.microbiologics.com

技术支持

电话: 1.320.229.7045
电邮: techsupport@microbiologics.com

客户服务

电话: 1.320.253.1640
电邮: info@microbiologics.com



MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
电话: 33 (0)4 76 86 43 22
传真: 33 (0)4 76 17 19 82
电邮: info@medimark-europe.com

图示说明

制备

1

阅读试剂盒包装说明书、
使用说明或适用的实验室规程。

2



在切口处撕开小袋。

3


从小袋中取出小瓶，
确保丸体位于小瓶底部，
然后打开。



A. Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸)

4

用适当的缓冲液将冻干丸体再水合。
建议最小体积为 100 μ l。

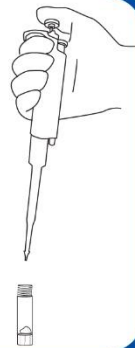

5

将小瓶全速涡旋振荡 10 秒
以混合。离心以收集试管底部
再水合的灭活靶材料。



6


取适量用于检测，并按照实验室规程或制造商的
说明处理样品。

附注：每颗丸体预期用作一次性测试。可以立即进行稀释
并使用。不建议储存再水合或稀释的材料以备将来使用。

B. QC Sets and Panels — Helix Elite™ Molecular Standards (灭活丸)

4

将冻干丸体加入含有适当缓冲液、转运培养基或无核酸酶水的试管或小瓶中再水合。

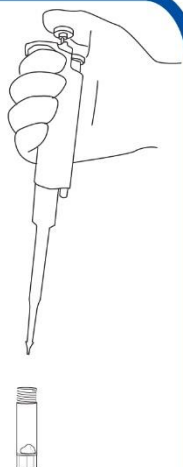

对于最低水合体积：

- 请参阅分类编号的产品页面，网址：www.microbiologics.com 或参阅 *QC Sets and Panels: 最低水合体积文档*，网址：www.microbiologics.com，或
- 致电 1.320.229.7045，美国免费电话 1.866.286.6691，或发送电子邮件至 techsupport@microbiologics.com 联系技术支持人员。

5

将小瓶全速涡旋振荡 10 秒以混合。离心以收集试管底部再水合的灭活靶材料。



6

取适量用于检测，并按照实验室规程或制造商的说明处理样品。

附注：每颗丸体预期用作一次性测试。可以立即进行稀释并使用。不建议储存再水合或稀释的材料以备将来使用。