


PARASITE SUSPENSIONS

CLINICAL • PROFICIENCY • EDUCATION

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


1

Αναμείξτε σχολαστικά το εναιώρημα ανακινώντας δυνατά ή με περιδίνηση.

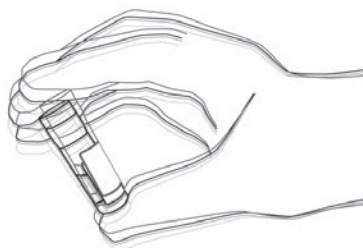

2

Αφήστε το εναιώρημα να καθιζάνει για 5-10 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε διαδικασία εξέτασης.

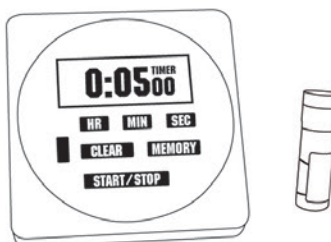

3

Τοποθετήστε προσεκτικά μια πιπέτα στον πάτο του φιαλιδίου και συλλέξτε μία μόνο σταγόνα για εξέταση.

Ανατρέξτε στις τυπικές εργαστηριακές διαδικασίες ή στις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος χρώσης ή του κит εξέτασης σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης.



 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.